

BOLSA ORINA FLEMING PIERNA 750cc

C.N. 493528

DESCRIPCIÓN:

Bolsa para la recogida de orina, de pierna, con capacidad mínima de 750 c.c. y tubo de 35 cm, que incorpora una válvula antirretorno que garantiza que la orina emitida no pueda volver a su procedencia y válvula de vaciado.

CLASIFICACIÓN:

Según **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de Clase I.

Según el **Reglamento (UE) 2017/745**: Producto Sanitario de Clase I

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad mínima: 750 c.c. (+/-10%).
- **Bolsa recogida:** Fabricada con 2 láminas de PVC, transparente lechoso, soldadas por alta frecuencia. Propiedades:
 - A. La bolsa lleva en sus extremos superiores e inferiores, hendiduras que permiten la introducción de las cintas para su fijación a la pierna.
 - B. En la parte anterior de la bolsa está impresa una escala en c.c., de valor aproximado.
- **Válvula antirretorno:** En la parte superior de la bolsa, se dispone de una doble lámina flexible, de PVC, que impide la posible recisión de líquidos o gases.
- **Tubo:** De PVC transparente de 35 cm (+/- 2cm) de longitud total, soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia, para garantizar su perfecta adhesión. La luz interior del tubo es de 5 mm.
- **Conector:** De granza de PVC blanco, soldado al final del tubo y con un diámetro interior de 5 mm para fijación a sonda o colector.
- **Capuchón:** De polietileno de baja densidad, de color azul, para protección del conector.



- **Válvula de vaciado:** De granza de PVC blanco, soldado a la parte inferior de la bolsa y con un diámetro interior libre de salida de 6 mm.
- **Tapón:** De polietileno de baja densidad, de color azul, deslizable para cierre y apertura de la válvula de vaciado.
- No contiene látex.

INDICACIONES:

Las bolsas de recogida de orina, para pierna, son productos sanitarios, usados como recipiente donde queda remansada y almacenada la orina procedente de un colector o de una sonda vesical, aplicada al enfermo, no encamado.

CADUCIDAD:

5 Años.

MODO DE USO:

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- Abrir el envase con precaución para no dañar el producto.
- Pasar una cinta de sujeción por las hendiduras que tiene la bolsa en la parte superior y otra cinta en las hendiduras de la parte inferior de la bolsa.
- Acoplar la bolsa, a la parte interior de la pierna y sujetar con las cintas elásticas y el cierre de botón.
- Asegurarse de cerrar bien el sistema de vaciado.
- Conectar la bolsa a la sonda o colector, por medio de la boquilla situada al extremo del tubo de la bolsa.
- La bolsa ha de quedar siempre en posición vertical.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- Vaciar el contenido de la bolsa en el retrete antes de su desecho.

PRECAUCIONES:

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- No desechar en el ambiente. Tirar directamente a la basura.



CONSERVACIÓN:

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN:

- Unidad de venta: caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S. (Se incluye 1 juego de cintas de fijación).
- Embalaje: caja con 21 cajas de 30 unidades.
- Presentación hospitalaria: caja de 300 unidades.



FLEMING

Caja 30 unidades:



21 cajas x 30 unidades:



CE

