

## BOLSA ORINA FLEMING VÁLVULA ANTIRRETORNO

C.N. 494302

### **DESCRIPCIÓN:**

Bolsa para la recogida de orina, de cama, con capacidad mínima de 2000 c.c. y tubo de 90 cm., que incorpora una válvula antirretorno que garantiza que la orina emitida no pueda volver a su procedencia.

### **CLASIFICACIÓN:**

Según **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de **Clase I**.

Según el **Reglamento (UE) 2017/745**: Producto Sanitario de Clase I

### **INDICACIONES:**

Las bolsas de recogida de orina, son productos sanitarios, usados como recipiente donde queda remansada y almacenada la orina procedente de un colector o de una sonda vesical, aplicada al enfermo.

### **CARACTERÍSTICAS:**

- **Capacidad:** 2000 c.c. (+/-20%)
- **Bolsa recogida:** Fabricada con 2 láminas de PVC, transparente lechoso, soldadas por alta frecuencia.
  - A. La bolsa lleva en sus extremos superiores, hendiduras que permiten el acoplamiento de un colgador, para su fijación a la cama.
  - B. En la parte anterior de la bolsa está impresa una escala en c.c., de valor aproximado.
- **Válvula antirretorno:** En la parte superior de la bolsa, se dispone de una doble lámina flexible, de PVC, que impide la posible recisión de líquidos o gases.
- **Tubo:** De PVC transparente de 90 cm (+/-3cm) de longitud total, soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia, para garantizar su perfecta adhesión. La luz interior del tubo es de 5 mm.
- **Conector:** De granza de PVC blanco, soldado al final del tubo y con un diámetro interior de 5 mm para fijación a sonda o colector.
- **Capuchón:** De polietileno de baja densidad, de color azul, para protección del conector.
- No contiene látex.



**CADUCIDAD:**

5 años.

**MODO DE USO:**

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- Abrir el envase con precaución para no dañar el producto.
- Acoplar la bolsa, por las hendiduras de los extremos superiores, al colgador de plástico incluido en la caja y colgar la bolsa, de la cama.
- Asegurarse de cerrar bien el sistema de vaciado.
- Conectar la bolsa a la sonda o colector, por medio de la boquilla situada al extremo del tubo de la bolsa.
- La bolsa ha de quedar siempre en posición vertical.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- Vaciar el contenido de la bolsa en el retrete antes de su desecho.

**PRECAUCIONES:**

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- No desechar en el ambiente. Tirar directamente a la basura.

**CONSERVACIÓN:**

Mantener en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

**PRESENTACIÓN:**

- Unidad de venta: caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S. (Se incluye 1 colgador).
- Embalaje: caja con 12 cajas de 30 unidades.

Caja 30 unidades:

12 cajas x 30 unidades:



CE

