

FAJA CONTENCIÓN FLEMING 3 BANDAS

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja elástica de 3 bandas, cosidas entre sí con cosido elástico FAGOTY, para ajustar al abdomen. Las bandas han sido revestidas interiormente de hilatura afelpada. El cierre velcro permite una sujeción en distintas posiciones y por tanto, una regulación de la compresión.

| REF. INTERNA | COLOR | C.N. | TALLA | CINTURA CM | ALTURA FAJA | EAN13 |
|--------------|--------|----------|--------|------------|-------------|---------------|
| 2202301 | BLANCO | 385856.4 | 1 | 70-90 | 24 cm | 8470003858564 |
| 2202302 | BLANCO | 385880.9 | 2 | 90-110 | 24 cm | 8470003858809 |
| 2202303 | BLANCO | 385914.1 | 3 | 110-130 | 24 cm | 847000385914 |
| 2202304 | BLANCO | 379016.1 | 4 | 130-150 | 24 cm | 8470003790161 |
| 2202305 | BLANCO | - | 5 ESP. | 145-160 | 24 cm | 8426828871103 |
| 2202306 | BLANCO | - | 6 ESP. | 160-175 | 24 cm | 8426828872865 |
| 2434301 | BEIGE | - | 1 | 70-90 | 24 cm | 8426828876290 |
| 2434302 | BEIGE | - | 2 | 90-110 | 24 cm | 8426828876306 |
| 2434303 | BEIGE | - | 3 | 110-130 | 24 cm | 8426828876313 |
| 2434304 | BEIGE | - | 4 | 130-150 | 24 cm | 8426828876320 |
| 2434305 | BEIGE | - | 5 ESP. | 145-160 | 24 cm | 8426828876375 |

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Contusiones torácico- abdominales.
- Contención post-operatoria abdominal.
- Contención post-parto.
- Hernias ventrales.
- Lesiones musculares abdominales.
- Eventraciones abdominales post-operatorias.



CARACTERÍSTICAS

- Color: blanco y beige.
- Composición:
 - Cierre velcro: 100% Poliamida.
 - Bandas: Poliéster 60%, Poliamida 30%, Elastán 10%.
- Cierre garantizado para 2000 usos.

MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor del abdomen de forma que las bandas queden en la espalda y el cierre en la parte delantera.
- La tira velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al lado izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar de forma adecuada, procurando que no presione en exceso.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

CONSERVACIÓN

- Mantener el cierre velcro cerrado durante el lavado.
- Lavar a mano, en agua templada como máximo 30°C. con jabón neutro.
- Secar sobre una superficie plana y alejada de fuentes de calor.
- No usar lejía.
- No planchar.



PRESENTACIÓN

Unidad en caja de cartón con orificio para colgarla.



fleming

CE